

1 Введите логин/номер телефона /ИНН или приложите карту

Логин/Телефон/ИНН

Пароль

Войти

2 Подтвердите личные данные



Отверткин
Василий Степанович
12-11-1987

Нет

Да

3а Смотрите в камеру и нажмите «Сделать фото»*



Подтвердите личные данные

Сделать фотографию

Отверткин
Василий Степанович
12-11-1987

Нет

Да

36 Привяжите карту СКУД*



Подтвердите личные данные


Привязать карту СКУД

Отверткин
Василий Степанович
12-11-1987

Нет

Да

4 Дуйте в воронку алкотестера до звукового сигнала

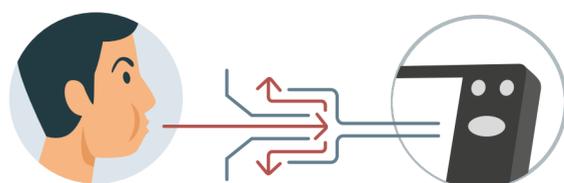

5 Измерьте артериальное давление

Наденьте манжету, сядьте ровно, нажмите кнопку НАЧАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ на экране, не разговаривайте и не двигайтесь при замере



6 Произведите измерение температуры и осмотр слизистой

Поднесите язык к камере на 10-15 см, дождитесь результата медосмотра



7 Подтвердите результат медосмотра



Отверткин
Василий Степанович
12 октября 1958

Тип	послерейсовый
Жалобы	нет
Температура	в норме
Пульс	65,0
Давление	104,0/75,0
Алкоголь	0,0
Реакция	нормальная

Нет

Да

8а Получите допуск



Дождитесь заключение медработника

Завершить

86 Если медосмотр не пройден



Повторное прохождение медосмотра возможно не ранее, чем через 10 минут

Завершить

